

Thermostatgesteuerter

## **Sicherheitserwärmer**

für Ex-3-N Gold und Ex-3-N K

## Gebrauchsanleitung

Der **Ex-3-N Sicherheitserwärmer** dient ausschließlich dem Erwärmen der **Abformmassen Ex-3-N Gold** und **Ex-3-N K**.

Der **Ex-3-N Sicherheitserwärmer** darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Nach dem Einschalten des Gerätes leuchtet im Schalter die grüne Betriebslampe auf.

Der Regler des Gerätes sorgt für eine einwandfreie Einhaltung der Verarbeitungstemperatur der **Ex-3-N Abformmassen**.

Der Schaltzustand des Reglers wird über die rote Kontrollleuchte angezeigt.

Die **Ex-3-N Abformmassen** sind nach etwa 15 Minuten gebrauchsfertig.

Der auf die Heizplatte aufgeschnappte Ring verhindert ein Abrutschen der aufgestellten Schalen mit den **Ex-3-N Materialien**.

**Wichtig:** Das Material darf während der Aufheizphase und beim Abkühlen (nach dem Ausschalten des Gerätes) nicht umgerührt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass das **Ex-3-N Abformmaterial** kristallisiert.

Reinigen Sie bitte die pulverbeschichtete Oberfläche des Gerätes nicht mit scharfen Gegenständen, sondern wischen Sie grobe Verschmutzungen im warmen Zustand ab. Verbleibende Reste können mit **Exin Lösemittel** leicht entfernt werden.

Dem Gerät sind zwei Papiermanschetten beigegeben, die als Schutz vor Verschmutzungen aufgelegt werden. Diese Papiermanschetten können Sie nachbestellen.

Wir setzen ausschließlich Teile hoher Qualität ein und fertigen unter sorgfältiger Kontrolle. Wir gewähren auf den **Ex-3-N Sicherheitserwärmer** ein Jahr Garantie.

Sollte eine Reparatur notwendig werden, stellen wir Ihnen kostenlos ein Austauschgerät zur Verfügung.

### **Technische Daten:**

Spannung 220 V 50 Hz Strom 0,5 A

Leistung 100 W

Arbeitstemperatur in der Schale 95 °C

zulässige Umgebungstemperatur max. 45 °C

Sollten im Zusammenhang mit der **Ex-3-N Methode** Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Eine genaue Beschreibung des Verfahrens können Sie der Broschüre „**Totale Prothetik mit der Ex-3-N Methode**“ und unserer Demonstrations-CD entnehmen. Beides kann bei uns bezogen werden.

Sie finden uns auch im Internet unter **www.ex-3-n.de**.