

EX-3-N Gold

Korrekturstäbchen

Gebrauchsanleitung

archiv dchf 990203
datei gb_korst.doc

Die **EX-3-N Gold** Korrekturstäbchen dienen zu kleinen Ausbesserungen an den Rändern oder der dorsalen Abdämmung totaler Prothesen.

Das Material kann wie Siegellack in einer Spiritus- oder Gasflamme mit atmosphärischer Verbrennung vorsichtig angeschmolzen und an der Prothese aufgetupft werden. Bei größeren Fehlstellen oder dem Aufbringen einer dorsalen Abdämmung ist es besser, ein Stück Korrekturstäbchen in einem Warmwasserbad mit etwa 45° C zu erweichen, einen entsprechenden Strang zu formen und an der Prothese anzudrücken.

Das Verfahren bei der Abformung und beim Ablösen ist das gleiche wie bei der Funktionsabformung mit **EX-3-N Gold**.

Bitte fordern Sie, falls dieses nicht bekannt sein sollte, die entsprechenden Anleitungen unter der obigen Adresse an, wir senden sie Ihnen gerne per Fax oder Brief.

Bei größeren Defekten, etwa der Korrektur eines ganzen Prothesenrandes empfiehlt sich allerdings aus ökonomischen Gründen eine Abformung mit **EX-3-N K** Kauunterfüttungsmaterial. Auch darüber erhalten Sie gerne Informationen.

Eine genaue Beschreibung des Verfahrens können Sie der Broschüre "**Totale Prothetik mit der Ex-3-N Methode**" und unserem Demonstrationsvideo entnehmen. Beides kann bei uns bezogen werden.